



# REHABILITACIÓN



**TST-RPSP9101-EPTB COMPRESA DE PERLAS  
PARA TERAPIA FRIO/CALIENTE BENESTA  
REXICARE, TAMAÑO CHICA**



## DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Compresa de perlas  
Suave y confortable  
Para terapia fría o caliente  
Reusable  
Se puede utilizar en horno de micro ondas



## ESPECIFICACIONES

Dimensiones: 10 x 15 cm  
Peso: 150 gramos  
Material: Perlas de gel  
Color: azul  
Material de empaque: PVC  
Tamaño chico  
30 a 5 minutos se conserva caliente la compresa  
Terapia fría: de 10 a 15 minutos en congelador  
Terapia en agua caliente: meter la compresa en agua caliente de 10 a 15 minutos máximo a 80°C  
Terapia caliente en microondas: colocar la compresa por 25 segundos a una potencia máxima de 800W



## USOS

Se usa la compresa para desinflamación muscular, tratamientos posts quirúrgicos y como herramienta complementaria de rehabilitación para cualquier zona del cuerpo.



## PUNTOS DE VENTA

Vida útil de 3 años  
Hecho en Taiwan por una de las empresas mas grandes dedicadas a la fabricación de este tipo de productos  
Garantía: 1 año por defecto de fabricación

