



REHABILITACIÓN



**TST-RPSP9103-EPTB COMPRESA DE PERLAS
PARA TERAPIA FRIO/CALIENTE BENESTA
REXICARE, TAMAÑO GRANDE**



DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Compresa de perlas
Suave y confortable
Para terapia fría o caliente
Reusable
Se puede utilizar en horno de micro ondas



ESPECIFICACIONES

Dimensiones: 28 x 16 cm
Material: Perlas de gel
Color: azul
Material de empaque: PVC
Tamaño grande
30 a 35 minutos se conserva caliente la compresa
Terapia fría: de 10 a 15 minutos en congelador
Terapia en agua caliente: meter la compresa en agua caliente de 10 a 15 minutos máximo a 80°C
Terapia caliente en microondas: colocar la compresa por 25 segundos a una potencia máxima de 800W



USOS

Se usa la compresa para desinflamación muscular, tratamientos posts quirúrgicos y como herramienta complementaria de rehabilitación para cualquier zona del cuerpo.



PUNTOS DE VENTA

Vida útil de 3 años
Hecho en Taiwan por una de las empresas mas grandes dedicadas a la fabricación de este tipo de productos
Garantía: 1 año por defecto de fabricación

