




REHABILITACIÓN



TST-SP9112-EPB COMPRESA DE PERLAS PARA TERAPIA FRIO/CALIENTE BENESTA REXICARE EN FORMA DE "U" PARA HOMBROS

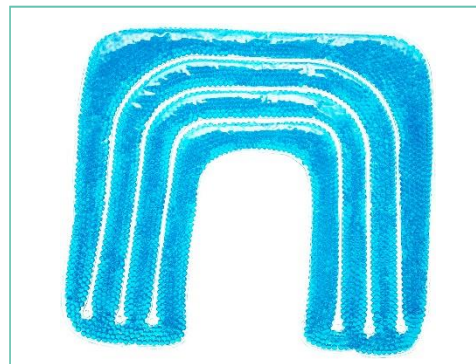

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Compresa de perlas en forma de U
Suave y confortable
Para terapia fría o caliente
Reusable
Se puede utilizar en horno de microondas



ESPECIFICACIONES

Dimensiones: 42 x 36.5 cm
Material: Perlas de gel
Color: azul
Material de empaque: PVC
30 a 45 minutos se conserva caliente la compresa.
Terapia fría: de 10 a 15 minutos en congelador.
Terapia en agua caliente: Meter la compresa en agua caliente de 10 a 15 minutos máximo a 80°C
Terapia caliente en microondas: Colocar la compresa por 25 segundos a una potencia máxima de 800W



USOS

Se usa la compresa para reducir la fatiga en los hombros, cuello y zona alta de la espalda.



PUNTOS DE VENTA

Vida útil de 3 años.
Hecho en Taiwan por una de las empresas mas grandes dedicadas a la fabricación de este tipo de productos.
Garantía: 1 año por defecto de fabricación.

