

# REHABILITACIÓN

▶ SPI-VNM  
Cinta Kinesiológica Benesta



## DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Cinta kinesiológica



## ESPECIFICACIONES



### Material:


95% algodón + 5% spandex (licra)  
Pegamento Acrílico  
Algodón 60%, pegamento 20%  
Color: Beige, rojo, azul, rosa y negra




## USOS

### El método de uso de la cinta kinesiológica

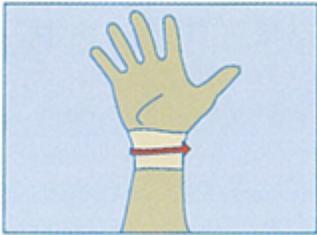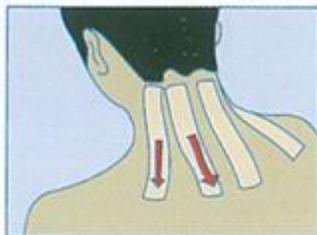MUÑECA	HOMBRO
Cuando doble y extienda, una vaga sensación de la muñeca aparecerá	Incomodidad del hombro causada por una postura incorrecta o trabajo excesivo. Dibujos de la aplicación de la cinta kinesiológica.
 <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Coloque la cinta en la muñeca donde presente tensión.</li> <li>2. Corte la cinta en la parte superior y coloque correctamente</li> </ol>	 <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Coloque la cinta desde la parte superior del hombro hacia abajo.</li> <li>2. Fije la parte frontal y la parte trasera.</li> </ol>
CINTURA	RODILLA
Incomodidad de cintura causada por unas postura inadecuada o trabajo excesivo. Dibujos de la aplicación de la cinta kinesiológica	Cuando doble y extienda, una vaga sensación de la rodilla aparecerá. Dibujos de la aplicación de la cinta kinesiológica

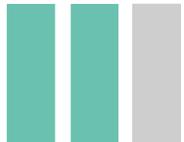

# REHABILITACIÓN

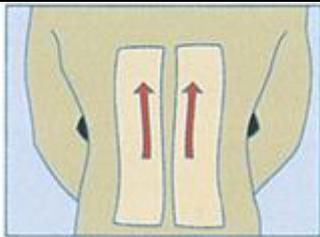

1. Pegue en extremo sin cortar en el centro de los huesos en la parte inferior de la vértebra lumbar.
2. Cuando se encuentre inclinado, pegue los dos pedazos de cinta en el músculo que se encuentra en ambos lados del hueso de la espalda



1. Al doblar la rodilla un poco, comience pegando la cinta desde la parte interior debajo de la rodilla hasta la parte trasera de la rodilla en espira.
2. Pegue desde la parte interior arriba de la rodilla hasta la parte trasera de la misma en espiral.



## PUNTOS DE VENTA

Cintas para vendaje.  
Garantía de 6 meses.

